



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Galantamine

Sang

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin
<b>Indication diagnostique</b>	Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication
<b>Préparation du patient</b>	Le patient doit être informé que cette analyse ne figure pas sur la liste des analyses en vigueur et qu'elle ne sera pas obligatoirement prise en charge par les caisses maladie
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 42 264
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	NON
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dosages de médicaments</li></ul>
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> <b>Lien</b> <a href="#">UPPC - Analyse de médicaments psychotropes</a>
<b>Renseignements à fournir</b>	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sang veineux</li></ul>
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	Prélèvement juste avant la prise du médicament. Délai d'équilibration après dernier changement de posologie : 1 semaine
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

**Contenant(s) autre(s)**

Sang hépariné ou sérum sans gel séparateur aussi utilisable

**Stabilité maximale avant analyse**

**Réfrigéré**

Nuit et we

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Centrifuger et décanter

**Conservation**

4°C

**Conditions d'acheminement**

Température ambiante, courrier A

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

Site de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC

**Dépose des prélèvements**

Site de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100

**Site**

Hôpital de Cery

**Adresse**

Cery  
1008 Prilly

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone**

021 31 42 264

**Site web**

[UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique](#)



## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC)

**Site** Hôpital de Cery

**Adresse** Hôpital de Cery  
1008 Prilly

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 42 264

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • UPLC-MS/MS

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 3 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 126