



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Quétiapine

Sang



## Informations générales

### Examen

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>But de l'analyse</b>           | Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin  |
| <b>Indication diagnostique</b>    | Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication |
| <b>Renseignement téléphonique</b> | 021 31 42 264   |
| <b>Horaire de réalisation</b>     | Heures ouvrables du laboratoire   |
| <b>Fréquence d'exécution</b>      | 2x/semaine  |
| <b>Analyse accréditée</b>         | OUI   |
| <b>Spécialité</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Dosages de médicaments</li></ul>                                    |
| <b>Prescription</b>               |   |
| <b>Formulaire de demande</b>      | <b>Numéro de commande</b><br><b>Lien</b><br><a href="#">UPPC - Analyse de médicaments psychotropes</a>    |
| <b>Renseignements à fournir</b>   | Remplir scrupuleusement toutes les rubriques  |

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

Prélèvement juste avant la prise du médicament.  
Délai d'équilibration après dernier changement de posologie : 4 jours

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

#### Contenant(s) autre(s)

Sang hépariné ou sérum sans gel séparateur aussi utilisable

#### Stabilité maximale avant analyse

#### Réfrigéré

Nuit et we

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Centrifuger et décanter

#### Conservation

4°C

#### Conditions d'acheminement

Température ambiante, courrier A

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Site de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC

#### Dépose des prélèvements

Site de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100

#### Site

Hôpital de Cery

#### Adresse

Cery  
1008 Prilly

---

**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

---

**Téléphone** 021 31 42 264

---

**Site web** [UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique  
(UPPC)

---

**Site** Hôpital de Cery

---

**Adresse** Hôpital de Cery  
1008 Prilly

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

---

**Téléphone** 021 31 42 264

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- UPLC-MS/MS

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 3 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 126