Catalogue des analyses - Laboratoire

# Acide aminé spécifique

Urine

#### Information(s) importante(s)

**Attention** 

• Acheminer immédiatement le tube

## Informations générales

**Examen** 

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire et service de piquet
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	Acide aminé, acides aminés, amines (acides), aminoacides, arginine, cystine, lysine, ornithine
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien 011 - Chimie clinique - Urine

### Pré analytique

Prélèvement

• Urine fraîche

**Matériel standard** 

**Quantité** 

**Contenant** Tube 8.5 ml pour urine





	Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
Volume minimum	1 ml
Matériel pédiatrique	
Volume minimum	300 μl
Stabilité maximale avant envoi	
Ambiant	15 min
Réfrigéré	15 min
Congelé	72h
Traitement du prélèvement pour re	quérants externes
Préparation	Volume minimum: 1 ml
Conservation	Conserver dans le congélateur -80°
Conditions d'acheminement	Envoi sur glace sèche ou neige carbonique
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24



# **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Daporatione de cimme cimique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• LC-MS
Post analytique	
Tarif	
Tarif (CHF)	53.1
Validité	Validité dès le 01.07.09

Laboratoire de chimie clinique



Condition(s) spéciale(s)

à l'analyse et sont facturées en sus.

facturables en sus

La créatinine et la bandelette urinaire sont automatiquement ajoutées

Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses