



Catalogue des analyses - Laboratoire

Acide aminé spécifique

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

Préparation du patient

Patient à jeun (>4h après le dernier repas)

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire et service de piquet

Fréquence d'exécution

1x/jour

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Acide aminé, Acides aminés, aminés (acides ...) Aminoacides

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

010 - Chimie clinique - Sang

Renseignements à fournir

Noter l'acide aminé sous commentaires

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium

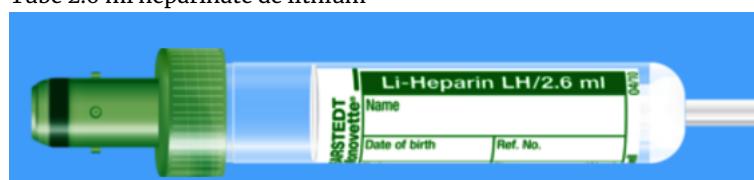

Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Volume minimum 150 µl de plasma

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum 70 µl de plasma

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 15 min

Réfrigéré 15 min

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger durant 5 minutes, à 15°C, 3600g
Maximum 15 minutes après le prélèvement.
Décanter le plasma, volume minimum: 0.15ml de plasma.

Conservation Conserver dans le congélateur à -80°C

Conditions d'acheminement Envoi sur glace sèche ou neige carbonique

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439



Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode • LC-MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 53.1

Condition(s) spéciale(s) Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus