

Catalogue des analyses - Laboratoire

Acide aminé spécifique

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient	Patient à jeun (>4h après le dernier repas)
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire et service de piquet
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> Chimie clinique
Synonyme	Acide aminé, Acides aminés, aminés (acides ...) Aminoacides
Prescription	
Formulaire de demande	<p>Numéro de commande 061219</p> <p>Lien 010 - Chimie clinique - Sang</p>
Renseignements à fournir	Noter l'acide aminé sous commentaires

Pré analytique

Prélèvement	
Nature	<ul style="list-style-type: none"> Sang veineux
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette bouchon orange - N° commande : 510221

Volume minimum

150 µl de plasma

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette bouchon orange - N° commande : 511158

Volume minimum

70 µl de plasma

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

15 min

Réfrigéré

15 min

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger durant 5 minutes, à 15°C, 3600g
Maximum 15 minutes après le prélèvement.
Décanter le plasma, volume minimum: 0.15ml de plasma.

Conservation

Conserver dans le congélateur à -80°C

Conditions d'acheminement

Envoi sur glace sèche ou neige carbonique

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web

[Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode

- LC-MS



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

53.1

Condition(s) spéciale(s)

Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus