



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Acides gras libres (NEFA)

Sang

## Informations générales

### Examen

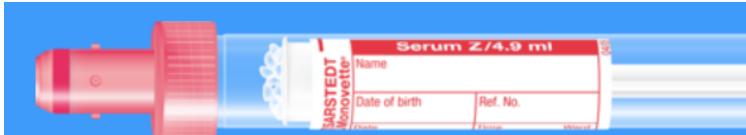
<b>Préparation du patient</b>	Patient à jeûn (12 heures).
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Synonyme</b>	Acides gras non estérifiés, free fatty acids, non esterified fatty acids, NEFA
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999069 <b>Lien</b> <u><a href="#">010 - Chimie clinique - Sang</a></u>

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	Envoi immédiat à la réception des laboratoires, desk du BH18-100 ou congélation du sérum décanté
---------------------------------------	--

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 4.9 ml sérum sans gel  Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

### Matériel pédiatrique

<b>Quantité</b>	2
<b>Contenant</b>	Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

---

**Volume minimum**

Bien rempli.

**Matériel néonatalogie**

**Volume minimum**

Bien rempli

**Traitements du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Centrifuger et décanter le sérum (min. 0.25 ml).

**Conservation**

Conserver le sérum à -20°C.

**Conditions d'acheminement**

Envoyer le sérum congelé sur glace carbonique.

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

Envoi immédiat à la réception des laboratoires.

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web**

[Réception des laboratoires](#)



## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

**Interprétation** Résultat rendu le jour même si le prélèvement parvient au laboratoire avant 12h30.

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 85.5