



Catalogue des analyses - Laboratoire

Acides aminés

Urine

Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Liste des composés du profil:

Alanine, Alloisoleucine, Alpha amino butyric acid, Amino adipic acid, Aminocaproic acid, Anserine, Arginine, Arginosuccinic acid, Asparagine, Aspartic acid, Aspartic acid, Amino isobutyric acid (AIB), Carnosine, Citrulline, Cystathionine, Cysteine (CHD), Cystine, Ethanolamine, Gamma amino butyric acid (GABA), Glutamic acid, Glutamine, Glycine, GlycylProline, Histidine, Homoarginine, Homocysteine, 3 hydroxy kynurenine, Hydroxylysine, 4-hydroxyproline, Isoleucine, Kynurenine, Leucine, Lysine, Methionine, 1-methylhistidine, Ornithine, Oxidised glutathione, Phenylalanine, Phosphoethanolamine, Proline, Saccharopine, Sarcosine, Serine, Sulfo cysteine, Taurine, Threonine

Préparation du patient

Patient à jeun (>4h après le dernier repas)

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire et service de piquet

Fréquence d'exécution

1x/jour

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Aminoacides, aminoacids, amines,

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061220

Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Urine fraîche

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum

1 ml

Matériel pédiatrique

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum

70 µl

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

15 min

Congelé

72h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Conserver dans le congélateur -80°

Conditions d'acheminement

Envoi sur glace sèche ou neige carbonique

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode

- LC-MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 184.5

Condition(s) spéciale(s) La créatinine et la bandelette urinaire sont automatiquement ajoutées à l'analyse et sont facturées en sus.
Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus