

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Acides aminés

Sang

## Informations générales

### Examen

<b>Préparation du patient</b>	Patient à jeun (>4h après le dernier repas)
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire et service de piquet
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/jour
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Chimie clinique</li></ul>
<b>Synonyme</b>	Acide aminé, acides aminés, amines (acides...), aminoacides, aminoacids, profil acides aminés
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 061219 <b>Lien</b> <a href="#">010 - Chimie clinique - Sang</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette bouchon orange - N° commande : 510221

#### Volume minimum

150 µl de plasma

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette bouchon orange - N° commande : 511158

#### Volume minimum

70 µl de plasma

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

15 min

#### Congelé

12h si plasma séparé

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Centrifuger durant 5 mn à température ambiante à 3600g  
Maximum 15 minutes après le prélèvement.  
Décanter le plasma, volume minimum: 0.150 ml de plasma.

#### Conservation

Conserver le plasma dans le congélateur -80°C

#### Conditions d'acheminement

Envoi sur glace sèche ou neige carbonique

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<a href="#"><u>Réception des laboratoires 24/24</u></a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#"><u>Chimie clinique</u></a>

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- LC-MS

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 184.5

**Condition(s) spéciale(s)** Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus