Catalogue des analyses - Laboratoire

Acides organiques

Urine



Information(s) importante(s)

Attention

• Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Liste des composés du profil: Lactate,Pyruvate,2-Hydroxybutyrate,Citrate,Cis- Aconitate,Isocitrate,2-Oxoglutarate ,Succinate,Fumarate,Malate,2- Hydroxyisobutyrate,Glycolate,Glycérate,3-Hydroxypropionate,3- Hydroxybutyrate,3-Hydroxyisobutyrate,2-Hydroxyisovalérate,3- Hydroxyisovalérate,Méthylmalonate,Méthylcitrate ,4- Hydroxybutyrate,Glycérol,Propionylglycine ,Isobutyrylglycine ,2- Méthylbutyrylglycine ,Isovalérylglycine ,3-Méthylcrotonylglycine ,Tiglylglycine ,Glutarate,3-Méthylglutarate,3-Méthylglutaconate ,3- Hydroxyglutarate,2-Hydroxyglutarate,3-Hydroxy-3-Méthylglutarate ,Ethylmalonate,Méthylsuccinate,5- Hydroxycaproate,Adipate,Subérate,Sébacate,Pimélate,Azélate,2- Hydroxyadipate,Octènedioate ,3-Hydroxyadipate,3- Hydroxysubérate,3-Hydroxysébacate,3-Hydroxydodécanedioate,2- Hydroxysébacate,Vanillactate,Mévalonate ,Mévalonate ,4- Hydroxyphénylacétate,4-Hydroxphényllactate,4- Hydroxyphénylpyruvate,Pyroglutamate,N-Acétylaspartate ,Homovallinate,Vanillymandélate,Hydantoine-5- propionate,Uracile,Thymine,Orotate,Malonate,Butyrylglycine ,Hexanoylglycine ,Subérylglycine,Phénylpropionylglycine,Succinylacétone
Ajout d'analyse	Prestations simultanées : créatinine-urine, stix urinaire, sulfitest
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	organic acids
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien 011 - Chimie clinique - Urine



Pré analytique

Prélèvement

• Urine fraîche

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum 2.0 ml

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum 1.0 ml

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 15 min

Congelé 72h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Volume minimum : 2.0 ml

Conservation Conserver à -20°C

Conditions d'acheminementEnvoi sur glace sèche ou neige carbonique.

Acheminement

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100



Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24</u> .
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique
Méthode analytique	



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

Condition(s) spéciale(s)

La créatinine et la bandelette urinaire sont automatiquement ajoutées à l'analyse et sont facturées en sus.

Si un seul composé du profil est demandé, l'intégralité du profil est réalisé et facturé.

Validité dès le 01.04.2020. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus.

