

Catalogue des analyses - Laboratoire

Acides organiques

LCR

Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Liste des composés du profil:

Lactate, Pyruvate, 2-Hydroxybutyrate, Citrate, Cis-Aconitate, Isocitrate, 2-Oxoglutarate, Succinate, Fumarate, Malate, 2-Hydroxyisobutyrate, Glycolate, Glycérate, 3-Hydroxypropionate, 3-Hydroxybutyrate, 3-Hydroxyisobutyrate, 2-Hydroxyisovalérate, 3-Hydroxyisovalérate, Méthylmalonate, Méthylcitrate, 4-Hydroxybutyrate, Glycérol, Propionylglycine, Isobutyrylglycine, 2-Méthylbutyrylglycine, Isovalérylglycine, 3-Méthylcrotonylglycine, Tiglylglycine, Glutarate, 3-Méthylglutarate, 3-Méthylglutaconate, 3-Hydroxyglutarate, 2-Hydroxyglutarate, 3-Hydroxy-3-Méthylglutarate, Ethylmalonate, Méthylsuccinate, 5-Hydroxycaproate, Adipate, Subérate, Sébacate, Pimélate, Azélate, 2-Hydroxyadipate, Octènedioate, 3-Hydroxyadipate, 3-Hydroxysubérate, 3-Hydroxysébacate, 3-Hydroxydodécanedioate, 2-Hydroxysébacate, Vanillactate, Mévalonate, Mévalonate, 4-Hydroxyphénylacétate, 4-Hydroxphényllactate, 4-Hydroxyphénylpyruvate, Pyroglutamate, N-Acétylaspartate, Homovallinate, Vanillymandélate, Hydantoine, 5-propionate, Uracile, Thymine, Orotate, Malonate, Butyrylglycine, Hexanoylglycine, Subérylglycine, Phénylpropionylglycine, Succinylacétone

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Acide organique, acides organiques

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande
061232

Lien

012 - Chimie clinique - Matériel spécial

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum

2.0 ml

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum	1.0 ml
Stabilité maximale avant analyse	
Ambiant	15 min
Congelé	72h
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Préparation	Centrifuger durant 5 minutes, à 15°C, 3600g Décanter le LCR, volume minimum: 1.0 ml
Conservation	Conserver le LCR à -20°C
Conditions d'acheminement	Envoi sur glace sèche/neige carbonique
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web[Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

AdresseRue du Bugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web[Chimie clinique](#)**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- GC-MS

Post analytique

Tarif**Tarif (CHF)**

225

Condition(s) spéciale(s)

Validité dès le 01.04.2020. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus.
Si un seul composé du profil est demandé, l'intégralité du profil est réalisé et facturé.