

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Adénosine déaminase

LCR

## Informations générales

### Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence et/ou horaire d'exécution	1x/jour 5/7 jours
Analyse accréditée	NON
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"><li>Chimie clinique</li></ul>
Synonyme	ADA, adénosine aminohydrolase
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061232 Lien <a href="#">012 - Chimie clinique - Matériel spécial</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"><li>Liquide céphalo-rachidien (LCR)</li></ul>
Instruction(s) particulière(s)	Envoi immédiat.
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

**Volume minimum**

300 µl.

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Centrifuger et décanter le surnageant (min. 0.3 ml).

**Conservation**

Congeler le surnageant à -20°C.

**Conditions d'acheminement**

Envoyer l'échantillon congelé sur glace carbonique.

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

Envoi immédiat

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • Enzymatique

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 3.2