



Catalogue des analyses - Laboratoire

Adénosine déaminase

Liquide pleural

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Chimie clinique
Synonyme	ADA, adénosine aminohydrolase
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061232 Lien 012 - Chimie clinique - Matériel spécial

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide pleural

Instruction(s) particulière(s)

Envoi immédiat.
Cette prestation est également réalisée sur d'autres matériels (liquide d'ascite, LCR, plasma héparinate de lithium, etc...): dans ce cas spécifier le type de matériel sur le bon de demande.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum

300 µl.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le surnageant (min. 0.3 ml).

Conservation

Congeler le surnageant à -20°C.

Conditions d'acheminement

Envoyer l'échantillon congelé sur glace carbonique.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Envoi immédiat

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Enzymatique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 3.2