



Catalogue des analyses - Laboratoire

Ammonium

Sang



Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube sur la glace

Informations générales

Examen

Préparation du patient	Patient à jeun.
	ATTENTION ! Prélèvement sans garrot, jamais de manière capillaire !
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Chimie clinique
Synonyme	NH4
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien <u>010 - Chimie clinique - Sang</u>

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang artériel
- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Prélèvement **SANS** garrot.

Mettre le prélèvement immédiatement sur glace pilée et l'acheminer dans les 15 minutes au laboratoire.


L'analyse doit se faire dans les plus brefs délais après la prise de sang, même si le plasma a été congelé.

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K

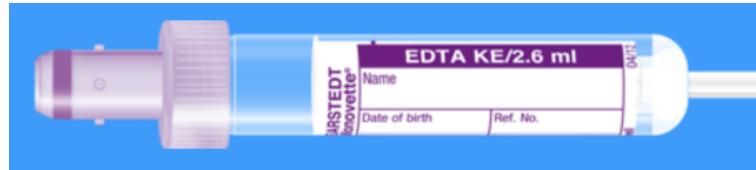

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique**Quantité**

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum

0.5 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes**Préparation**

Immédiatement centrifuger et décanter le plasma :

- volume idéal : 500 µl
- volume minimum : 300 µl

Conservation

Immédiatement congeler le plasma (si possible à -80°C, sinon à -20°C).

Conditions d'acheminement

Immédiatement envoyer le plasma congelé sur glace carbonique et par express.

Acheminement



Conditions d'acheminement	Envoyer le tube sur glace pilée par porteur au maximum dans les 15 minutes suivant le prélèvement.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Photométrique

Analyseur Integra 400 Plus / Roche Diagnostics

Technique Glutamate deshydrogénase (GldH) / NADPH

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 37.8