Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00629

V15 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Ammonium

Sang



Information(s) importante(s)

Attention

• Acheminer immédiatement le tube sur la glace

Informations générales

Examen

Préparation du patient Patient à jeun.

ATTENTION

! Prélèvement sans garrot, jamais de manière

capillaire!

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation

Analyse accréditée OUI

• Chimie clinique

Synonyme NH4

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

999069 **Lien**

<u>010 - Chimie clinique - Sang</u>



Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang artériel
- · Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Prélèvement **SANS garrot**.

Mettre le prélèvement immédiatement sur glace pilée et l'acheminer

dans les 15 minutes au laboratoire.

L'analyse doit se faire dans les plus brefs délais après la prise de sang,

même si le plasma a été congelé.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande: 500434

Volume minimum

0.5 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

	Immédiatement centrifuger et décanter le plasma :
Préparation	1

- volume idéal : 500 μl

– volume minimum : 300 μl

Conservation

Immédiatement congeler le plasma (si possible à -80°C, sinon à

-20°C).

Conditions d'acheminement

Immédiatement envoyer le plasma congelé sur glace carbonique et par

express.

Acheminement



Conditions d'acheminement	Envoyer le tube sur glace pilée par porteur au maximum minutes suivant le prélèvement.	dans les 15
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24</u>	



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Photométrique
Analyseur	Integra 400 Plus / Roche Diagnostics
Technique	Glutamate deshydrogénase (GldH) / NADPH
Post analytique	
Tarif	

37.8



Tarif (CHF)