

Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticorps anti-récepteur TSH (TRAK)

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Fréquence d'exécution 1x/semaine

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Synonyme TRAB

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
061219
Lien
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette bouchon blanc - N° commande : 510440

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

2

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette bouchon blanc - N° commande : 511122

Volume minimum

2 microtubes biens remplis

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

- Centrifuger et décanter le sérum :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
 - volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

Conservation

A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

Conditions d'acheminement

Envoyer le sérum à 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	1 semaine
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">ECLIA
Analyseur	cobas e 411 / Roche Diagnostics



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 28.8