Catalogue des analyses - Laboratoire

# Anticorps anti-récepteur TSH (TRAK)

Sang



### Informations générales

**Examen** 

Ajout d'analyse possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Fréquence d'exécution 1x/semaine

Analyse accréditée

• Chimie clinique

Synonyme TRAB

**Prescription** 

Formulaire de demande Numéro de commande

999069

Lien

010 - Chimie clinique - Sang

### Pré analytique

**Prélèvement** 

Nature • Sang veineux

**Matériel standard** 

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 2

**Contenant** Microtube 0.3 ml sérum





Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

#### **Volume minimum**

2 microtubes biens remplis

Centrifuger et décanter le sérum :

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant envoi

24h Réfrigéré

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le sérum : - volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml - volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml
Conservation	A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C
Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum à 4°C si < 24 h, sinon à -20°C
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24



## **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• ECLIA
Analyseur	cobas e 411 / Roche Diagnostics

# Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF)

