Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00637

V16 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticorps anti-thyroglobuline

Sang



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Fréquence d'exécution 1x/semaine

Analyse accréditée

• Chimie clinique

Synonyme anticorps anti-Tg

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

999069 **Lien**

010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 2

Contenant Microtube 0.3 ml sérum





Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum

2 microtubes bien remplis

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré 24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter le sérum :

- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml

- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

Conservation A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

Conditions d'acheminement Envoyer le sérum à 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

Acheminement

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception $^{24h/24}$

Téléphone 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine
Méthode analytique	
Analyseur	Kryptor GOLD / ThermoFisher Scientific
Technique	TRACE

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

Tarif

Tarif (CHF)

