



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Anticorps anti-thyroglobuline

Sang

## Informations générales

### Examen

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Ajout d'analyse</b>            | possible si sérothèque existante  |
| <b>Renseignement téléphonique</b> | 021 31 44 121   |
| <b>Fréquence d'exécution</b>      | 1x/semaine  |
| <b>Analyse accréditée</b>         | OUI   |
| <b>Spécialité</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chimie clinique</li> </ul>   |
| <b>Synonyme</b>                   | anticorps anti-Tg   |
| <b>Prescription</b>               |   |
| <b>Formulaire de demande</b>      | <p><b>Numéro de commande</b><br/>999069</p> <p><b>Lien</b><br/><a href="#">010 - Chimie clinique - Sang</a></p> |

## Pré analytique

### Prélèvement

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Nature</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sang veineux</li> </ul> |
|---------------|--|

### Matériel standard

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Quantité</b> | 1 |
|-----------------|---|

**Contenant** Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

### Matériel pédiatrique

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Quantité</b> | 2 |
|-----------------|---|

**Contenant** Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

|   |  |
|---|--|
| <b>Volume minimum</b>                                     | 2 microtubes bien remplis  |
| <b>Règle(s) si cumul avec d'autres analyses</b>           | Augmenter le nombre de microtubes  |
| <b>Stabilité maximale avant analyse</b>                   |  |
| <b>Réfrigéré</b>  | 24h  |
| <b>Traitement du prélèvement pour requérants externes</b> |  |
| <b>Préparation</b>  | Centrifuger et décanter le sérum :<br>- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml<br>- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml |
| <b>Conservation</b>                                       | A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C   |
| <b>Conditions d'acheminement</b>                          | Envoyer le sérum à 4°C si < 24 h, sinon à -20°C  |
| <b>Acheminement</b>                                       |  |
| <b>Dépose des prélèvements</b>                            | Réception des laboratoires   |
| <b>Site</b>   | BH18-100   |
| <b>Adresse</b>  | Bugnon 46<br>1011 Lausanne   |
| <b>Pneumatique</b>  | 439  |
| <b>Horaire d'ouverture de la réception</b>                | 24h/24   |
| <b>Téléphone</b>  | 021 31 44 280  |
| <b>Site web</b>   | <u><a href="#">Réception des laboratoires 24/24.</a></u>   |

## Analytique

### Prestataire

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Prestataire</b>                        | Laboratoire de chimie clinique    |
| <b>Site</b>                               | BH18-100                          |
| <b>Adresse</b>                            | Rue du Bugnon 46<br>1011 Lausanne |
| <b>Tube pneumatique</b>                   | 439                               |
| <b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b> | 24/24H                            |
| <b>Téléphone</b>                          | 021 31 44 121                     |
| <b>Site web</b>                           | <a href="#">Chimie clinique</a>   |

### Résultats

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Délai de rendu</b>     | 1 semaine                              |
| <b>Méthode analytique</b> |  |
| <b>Analyseur</b>          | Kryptor GOLD / ThermoFisher Scientific |
| <b>Technique</b>          | TRACE                                  |

## Post analytique

### Conservation après examens

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Aliquote congelé</b> | 1 an |
| <b>Tarif</b>            |      |
| <b>Tarif (CHF)</b>      | 15.1 |