



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Bandelette (stix) et sédiment automatisé**

Urine fraîche



## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Liste des paramètres:

- Bandelette (stix) : couleur, aspect, densité (réflectométrie), pH, sang, leucocytes, nitrates, protéines, glucose, corps cétoniques, bilirubine, urobilinogène.
- Sédiment automatisée : érythrocytes, leucocytes, petites cellules, grandes cellules, cyl. hyalins, cyl. pathologiques, bactéries, levures, mucus, cristaux (oxalate de Ca, phosphate de Ca, phosphate triple, acide urique, cholestérol, cystine).
- Prestation supplémentaire: sédiment urinaire (microscopie) pour l'identification des cylindres pathologiques et la recherche de lipides

---

#### Indication diagnostique

Le sédiment par microscopie n'est effectué qu'en cas de:

- protéines > 0.75 g/l
- anomalie du sédiment automatisé
- question spécifique ( yc recherche de trichomonas, autres cristaux). Sans motivation, seule l'analyse bandelette (stix) et sédiment automatisé sera effectuée.

---

#### Ajout d'analyse

non

---

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

---

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

Bandelette (stix) et sédiment automatisé:

- tous les jours de 08h00 à 18h30.

Sédiment par microscopie:

- lundi au vendredi: 08h00 - 16h30

---

#### Analyse accréditée

OUI

---

#### Spécialité

- Chimie clinique

---

#### Synonyme

Examen d'urine, sédiment urinaire, status urinaire, stix urinaire, urine-examen, pH, pH urine, pH urinaire

---

#### Prescription

---

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

061220

Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Urine fraîche

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

#### Volume minimum

3 ml

### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

#### Téléphone

021 31 44 280

#### Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)



## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Méthode analytique

**Technique** Réflectométrie (bandelette)  
Analyse d'images semi-automatisée (sédiment automatisé)  
Microscopie contraste de phase et polarisation (sédiment)

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 18

**Condition(s) spéciale(s)** En cas de sédiment urinaire (microscopie): tarif supplémentaire de  
10.5 CHF