Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00648

V18 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

bêta-hCG libre

Sang



Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Comme marqueur tumoral. Pour le dépistage prénatal des trisomies 21 et 13/18 au 1er trimestre, consulter la fiche correspondante "Dépistage des trisomies 21 et 13/18 - 1er trimestre". NB: Attention! cette analyse n'est pas recommandée pour le test et le suivi de grossesse: pour une telle indication, demander la bêta-hCG totale.	
Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante	
Renseignement téléphonique	021 31 44 121	
Fréquence et/ou horaire d'exécution 2 à 3x par semaine		
Analyse accréditée	OUI	
Spécialité	Chimie clinique	
Synonyme	sous-unité bêta libre de l'hormone chorionique gonadotrope humaine	
Prescription		
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang	



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum 1 microtube bien rempli

(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analysesAugmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré 24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter le sérum :

- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml

- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

Conservation A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C



Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum à 4°C si < 24 h, sinon à -20°C
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Résultats Délai de rendu	2-3 jours
Méthode analytique	
Analyseur	Kryptor GOLD / ThermoFisher Scientific
Technique	TRACE

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

Tarif

Tarif (CHF)

