Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00649

V18 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

bêta-hCG totale

Sang



Informations générales

Examen

Indication diagnostique

- pour le test et le suivi de grossesse
- hors grossesse, comme marqueur tumoral

Pour le dépistage prénatal de la **trisomie 21 au 2ème trimestre**, consulter la fiche correspondante "Dépistage de la trisomie 21 et de la

NFTN - 2ème trimestre".

Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	sous-unité bêta de l'hormone chorionique gonadotrope humaine
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069

010 - Chimie clinique - Sang



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

ContenantTube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande: 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum

1 microtube bien rempli

(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré 24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

PréparationCentrifuger et décanter le plasma :

volume idéal (y compris sérothèque) : 1 mlvolume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

Conservation A 4°C



Conditions d'acheminement	Envoyer le plasma à T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24
Analytique	
Prestataire	
Prestataire Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
	Laboratoire de chimie clinique BH18-100
Prestataire	
Prestataire Site	BH18-100 Rue du Bugnon 46
Prestataire Site Adresse	BH18-100 Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Prestataire Site Adresse Tube pneumatique	BH18-100 Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne 439
Prestataire Site Adresse Tube pneumatique Horaire d'ouverture du laboratoire	BH18-100 Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne 439 24/24H
Prestataire Site Adresse Tube pneumatique Horaire d'ouverture du laboratoire Téléphone	BH18-100 Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne 439 24/24H 021 31 44 121



Analyseur

cobas e 801 / Roche Diagnostics

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

Tarif

Tarif (CHF)

