



Catalogue des analyses - Laboratoire

Bilirubine directe

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 24 heures

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
999069
Lien
010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement


Nature • Sang veineux

Instruction(s) particulière(s) protéger l'échantillon de la lumière

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 2.6 ml héparinate de lithium

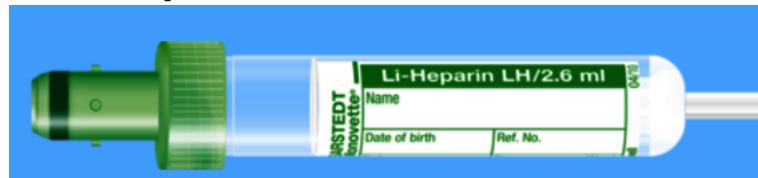


Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium

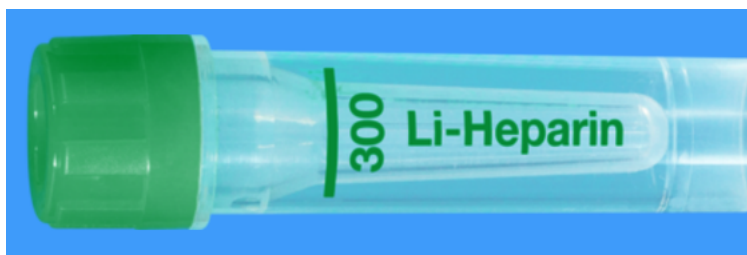

Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement protéger l'échantillon de la lumière

Acheminement

Conditions d'acheminement protéger l'échantillon de la lumière

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">Jendrassik
Analyseur	cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	3.2
--------------------	-----