



Catalogue des analyses - Laboratoire

# CA 15-3

Sang

## Informations générales

### Examen

**Ajout d'analyse** possible si sérothèque existante

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 121

**Fréquence et/ou horaire d'exécution** Jours ouvrables : 1x / jour

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Chimie clinique

**Synonyme** Antigène carbohydrate 15-3, antigène de cancer 15-3

### Prescription

**Formulaire de demande** Numéro de commande

999069

Lien

010 - Chimie clinique - Sang

## Pré analytique


### Prélèvement

**Nature** • Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 4.9 ml sérum sans gel

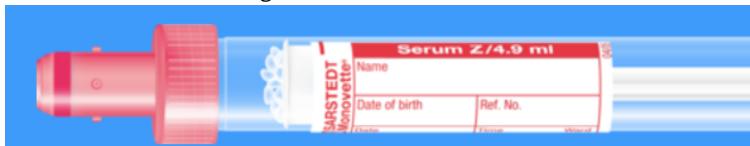

Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

### Matériel pédiatrique

**Quantité** 1

**Contenant** Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

**Volume minimum**

1 microtube bien rempli  
(pour les demandeurs externes: 2 microtubes bien remplis)

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Augmenter le nombre de microtubes.

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Centrifuger et décanter le sérum :  
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml  
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

**Conservation**

Conserver le sérum à 4°C; si > 24 h, congeler à -20°C

**Conditions d'acheminement**

Par transporteur : à T° ambiante  
Par poste : à 4°C

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

24h/24

**Téléphone**

021 31 44 280

**Site web**

Réception des laboratoires 24/24



## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

**Délai de rendu** < 24h

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • CMIA

**Analyseur** Architect i / Abbott

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 1 an

### Tarif

**Tarif (CHF)** 18