

Catalogue des analyses - Laboratoire

Calcitonine (CT)

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen**Préparation du patient**

Effectuer le prélèvement de préférence à jeun (ou au moins à distance des repas pour éviter l'hypergastrinémie).
En cas de traitement aux Inhibiteurs de la Pompe à Protons, effectuer le prélèvement avant la prise de médicament, mais idéalement, si l'arrêt du traitement est possible, effectuer le prélèvement après 2 semaines d'arrêt.

Ajout d'analyse

Non

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Thyrocalcitonine

Prescription**Formulaire de demande****Numéro de commande**

061219

Lien[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Si le transport au laboratoire n'est pas possible **dans un délai de 30 minutes**, centrifuger, décanter et congeler le sérum. Eviter l'hémolyse.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette bouchon blanc - N° commande : 510440

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

2

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette bouchon blanc - N° commande : 511122

Volume minimum

2 microtubes bien remplis

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Eviter l'hémolyse.

Immédiatement centrifuger et décanter le sérum :

- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml

- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

Conservation

Immédiatement congeler le sérum à -20°C

Conditions d'acheminement

A -20°C

Acheminement



Conditions d'acheminement

Acheminer le tube immédiatement mais au maximum **dans les 30 minutes** suivant le prélèvement.
Si l'acheminement n'est pas possible dans ce délai, centrifuger, décanter et congeler le sérum.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode

- ECLIA

Analyseur

cobas e 411 / Roche Diagnostics

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

1 an

Tarif

Tarif (CHF)

54