



Catalogue des analyses - Laboratoire

Calcitonine (CT)

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

Préparation du patient

Effectuer le prélèvement de préférence à jeun (ou au moins à distance des repas pour éviter l'hypergastrinémie).
En cas de traitement aux Inhibiteurs de la Pompe à Protons, effectuer le prélèvement avant la prise de médicament, mais idéalement, si l'arrêt du traitement est possible, effectuer le prélèvement après 2 semaines d'arrêt.

Ajout d'analyse

Non

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Thyrocalcitonine

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Si le transport au laboratoire n'est pas possible **dans un délai de 30 minutes**, centrifuger, décanter et congeler le sérum. Eviter l'hémolyse.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 2

Contenant Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 999002

Volume minimum 2 microtubes bien remplis

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Eviter l'hémolyse.
Immédiatement centrifuger et décanter le sérum :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

Conservation **Immédiatement** congeler le sérum à -20°C

Conditions d'acheminement A -20°C

Acheminement

Conditions d'acheminement Acheminer le tube immédiatement mais au maximum **dans les 30 minutes** suivant le prélèvement.
Si l'acheminement n'est pas possible dans ce délai, centrifuger, décanter et congeler le sérum.

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaires d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaires d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Principe de la méthode	• ECLIA
Analyseur	cobas e 411 / Roche Diagnostics



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 1 an

Tarif

Tarif (CHF) 54