



Catalogue des analyses - Laboratoire

Calcium ionisé

Sang



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Cette analyse peut être ajoutée ultérieurement à l'analyse de la gazométrie (si effectuée)

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Instruction(s) particulière(s) Eviter tout contact de l'échantillon avec l'air ambiant.
Lors du prélèvement, éliminer immédiatement toute bulle d'air présente dans la seringue.

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Seringue à gazométrie
NULL

Volume minimum 0.3 ml

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Seringue à gazométrie
NULL

Contenant(s) autre(s) capillaire à gazométrie

Volume minimum 0.3 ml (0.1 ml pour capillaire)

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Potentiométrie directe
Analyseur	RapidPoint 500, Siemens Healthineers

Post analytique

Tarif	
Tarif (CHF)	22.5