

Catalogue des analyses - Laboratoire

Calcium total

Urine 24h

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061220

Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

Renseignements à fournir

Volume et durée de la récolte.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Urine de 24h

Instruction(s) particulière(s)

Mélanger à chaque miction dans un bocal gradué 2l (pour diurèse/récolte d'urine).

Ne pas conserver l'urine native au frigo (risque de précipitation de sels de calcium).

Matériel standard

Quantité

1


Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 8.5 ml pour urine</p>  <p>Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151</p>
Volume minimum	2 ml
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">NM-BAPTA
Analyseur	cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif	
Tarif (CHF)	2.5