Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_00665

V15 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Carboxyhémoglobine

Sang



### Informations générales

#### **Examen**

But de l'analyse

L' hémoglobine totale, la methémoglobine, l'oxyhémoglobine et

l'hémoglobine réduite sont mesurées en même temps.

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation

Analyse accréditée OUI

**Spécialité** • Chimie clinique

**Prescription** 

Formulaire de demande Numéro de commande

999069 **Lien** 

<u>010 - Chimie clinique - Sang</u>



# Pré analytique

### Prélèvement

Nature	<ul><li>Sang artériel</li><li>Sang veineux</li></ul>
Instruction(s) particulière(s)	Eliminer immédiatement les bulles d'air après le prélèvement.
	Bien mélanger l'échantillon verticalement et horizontalement sans secouer (après avoir éliminé l'air).
	Ne pas laisser reposer l'échantillon, le mélanger à intervalle régulier.
	Ne pas casser le piston de la seringue.
	Enlever impérativement l'aiguille.
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Seringue à gazométrie NULL
Volume minimum	1.6 ml pour une seringue de gazométrie de 3 ml 0.6 ml pour une seringue de gazométrie de 1 ml
Matériel pédiatrique	
Quantité	1
Contenant	Seringue à gazométrie NULL
Volume minimum	0.6 ml pour une seringue de gazométrie de 1 ml
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439



Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique
Méthode analytique	
Analyseur	RapidPoint 500, Siemens Healthineers
Technique	Photométrie
Post analytique	

## Post analytique

Tarif

**Tarif (CHF)** 37.8

