



Catalogue des analyses - Laboratoire

Carnitines (libre et totale)

Sang

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	2x/mois
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Chimie clinique
Synonyme	carnitine
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061219 Lien 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Si fraction de réabsorption tubulaire demandée, effectuer prélèvements urinaires simultanés pour Carnitine-urine et Créatinine-urine

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette bouchon orange - N° commande : 510221

Volume minimum

200 µl de plasma

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette bouchon orange - N° commande : 511158

Volume minimum

150 µl de plasma

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Profil d'acylcarnitines, carnitine plasmatique libre et totale peuvent s'analyser sur le même échantillon

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger durant 5 minutes, à 15°C, 3600 g.
Décanner le plasma, volume minimum : 0.2 ml

Conservation

Conserver le plasma -20°C

Conditions d'acheminement

Envoi sur glace sèche ou neige carbonique.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode • LC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 83.7