

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Carnitines (libre et totale)

Sang

## Informations générales

### Examen

<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Fréquence d'exécution</b>	2x/mois
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chimie clinique</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	carnitine
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<p><b>Numéro de commande</b> 999069</p> <p><b>Lien</b> <a href="#">010 - Chimie clinique - Sang</a></p>

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sang veineux</li> </ul>
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	Si fraction de réabsorption tubulaire demandée, effectuer prélèvements urinaires simultanés pour Carnitine-urine et Créatinine-urine

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

**Volume minimum** 200 µl de plasma

**Matériel pédiatrique**

**Quantité** 1

**Contenant** Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

**Volume minimum** 150 µl de plasma

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** Profil d'acylcarnitines, carnitine plasmatique libre et totale peuvent s'analyser sur le même échantillon

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation** Centrifuger durant 5 minutes, à 15°C, 3600 g.  
Décanter le plasma, volume minimum : 0.2 ml

**Conservation** Conserver le plasma -20°C

**Conditions d'acheminement** Envoi sur glace sèche ou neige carbonique.

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

**Téléphone** 021 31 44 280



**Site web**

[Réception des laboratoires 24/24.](#)

## Analytique

**Prestataire**

**Prestataire**

Laboratoire de chimie clinique

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**

24/24H

**Téléphone**

021 31 44 121

**Site web**

[Chimie clinique](#)

**Méthode analytique**

**Principe de la méthode**

- LC-MS/MS

## Post analytique

**Tarif**

**Tarif (CHF)**

83.7