



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# CEA

Sang

## Informations générales

### Examen

**Ajout d'analyse** possible si sérothèque existante

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 121

**Fréquence et/ou horaire d'exécution** Jours ouvrables : 1x / jour

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Chimie clinique

**Synonyme** ACE, antigène carcinoembryonnaire

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
999069  
**Lien**  
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature** • Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

### Matériel pédiatrique

**Quantité** 1

**Contenant** Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

**Volume minimum** 1 microtube bien rempli.  
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** Augmenter le nombre de microtubes.

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation** Centrifuger et décanter le sérum :  
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml  
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

**Conservation** Conserver le sérum à 4°C;  
si > 24 h, congeler à -20°C

**Conditions d'acheminement** Par transporteur : à T° ambiante  
Par poste : à 4°C

### Acheminement

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

**Horaires d'ouverture de la réception** 24h/24

**Téléphone** 021 31 44 280

**Site web** Réception des laboratoires 24/24.

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Chimie clinique</a></u>

### Résultats

<b>Délai de rendu</b>	< 24h
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CMIA</li></ul>
<b>Analyseur</b>	Architect i / Abbott

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Aliquote congelé</b>	1 an
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	18