

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Chlorure

Selles

## Informations générales

### Examen

|                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renseignement téléphonique</b> | 021 31 44 121                                                                                                  |
| <b>Horaire de réalisation</b>     | Heures ouvrables du laboratoire                                                                                |
| <b>Fréquence d'exécution</b>      | 1x/jour                                                                                                        |
| <b>Analyse accréditée</b>         | OUI                                                                                                            |
| <b>Spécialité</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Chimie clinique</li></ul>                                                |
| <b>Synonyme</b>                   | Chlore, Cl                                                                                                     |
| <b>Prescription</b>               |                                                                                                                |
| <b>Formulaire de demande</b>      | <b>Numéro de commande</b><br>061232<br><b>Lien</b><br><a href="#">012 - Chimie clinique - Matériel spécial</a> |

## Pré analytique

### Prélèvement

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Nature</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Selles</li></ul> |
| <b>Instruction(s) particulière(s)</b> | Examen fait uniquement dans les selles liquides.       |
| <b>Matériel standard</b>              |                                                        |
| <b>Quantité</b>                       | 1                                                      |
| <b>Contenant</b>                      | Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc  |



N° commande : 997242

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conservation

Conserver les selles liquides (vol min 0.5 ml) à 4°C.

#### Conditions d'acheminement

Envoyer les selles liquides à T° ambiante.

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

#### Téléphone

021 31 44 280

#### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

#### Site web

[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Prestataire</b>                        | Laboratoire de chimie clinique         |
| <b>Site</b>                               | BH18-100                               |
| <b>Adresse</b>                            | Rue du Bugnon 46<br>1011 Lausanne      |
| <b>Tube pneumatique</b>                   | 439                                    |
| <b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b> | 24/24H                                 |
| <b>Téléphone</b>                          | 021 31 44 121                          |
| <b>Site web</b>                           | <a href="#"><u>Chimie clinique</u></a> |

### Méthode analytique

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Principe de la méthode</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Chloridométrie</li></ul> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|

## Post analytique

### Tarif

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <b>Tarif (CHF)</b> | 2.9 |
|--------------------|-----|