Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00680

V17 - 22/10/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Ciclosporine

Sang



Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de ciclosporine (intervalle de référence greffe dépendant).	
Indication diagnostique	Suivi thérapeutique, suspicion de taux insuffisant, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse.	
Renseignement téléphonique	021 31 44 121	
Fréquence et/ou horaire d'exécution	1x par jour Jours ouvrables: résultat le jour même si réception de l'échantillon avant 12h Samedi/Dimanche/Jours fériés: résultat le jour même si réception de l'échantillon avant 10h30 Pour demandeurs externes : jours ouvrables uniquement Si demande en urgence, contacter le laboratoire.	
Analyse accréditée	OUI	
Spécialité	Chimie clinique	
Synonyme Prescription	Ciclosol, cyclosporine, Sandimmun, Sandimmun Neoral	
-	Ciclosol, cyclosporine, Sandimmun, Sandimmun Neoral Numéro de commande 999070 Lien 013 - Chimie clinique - Médicaments	



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

- Délai d'équilibration : 2-3 jours à posologie constante

- Délai de prélèvement : juste avant la dose suivante (min. 8 h post-

dose)

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

Quantité

Microtube 0.5 ml EDTA-K

Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum 0.5 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation Conserver le sang complet à 4°C (vol. min. 0.5 ml)

Conditions d'acheminementA T° ambiante si l'acheminement se fait dans les 8 heures, sinon à 4°C

Acheminement

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique 439



Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24.	
Analytique		
Prestataire		
Prestataire	Laboratoire de chimie clinique	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H	
Téléphone	021 31 44 121	
Site web	Chimie clinique	
Résultats		
Interprétation	Obtention des résultats : - jours ouvrables : le jour même pour les prélèvements 12h00 - samedi/dimanche/jours fériés (demandeurs internes pour les prélèvements reçus avant 10h30 Interprétation par la Pharmacologie clinique : durant le ouvrables par le consultant TDM (021 31 42 500), sinon piquet de pharmacologie clinique en cas d'urgence.) : le jour même es heures
Méthode analytique		
Principe de la méthode	• CMIA	
Analyseur	Architect i / Abbott	



Technique

Mesure après extraction du sang complet

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 48 h

Tarif

Tarif (CHF) 49.5

Prestation Tarmed Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min

