Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00682

V17 - 03/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Citrate

Urine 24h



Informations générales

Examen

| Renseignement téléphonique | 021 31 44 121 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Horaire de réalisation | Heures ouvrables du laboratoire |
| Fréquence d'exécution | 1x/semaine |
| Analyse accréditée | OUI |
| Synonyme | Acide citrique |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande 061220 Lien <u>011 - Chimie clinique - Urine</u> |
| Renseignements à fournir | Durée et volume de la récolte. Si urine acidifiée indiquer "+ HCl". |



Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Bouteille plastique col large rond

- 1. Heure 0 (moment de la première miction considérée): Procéder à la miction dans les toilettes (urines jetées)
- Noter la date et l'heure
- 2. Dès ce moment et jusqu'au lendemain à la même heure (heure 24),

récolter toutes les mictions dans la (les) bouteille(s). Conserver la (les) bouteille(s) à 4°C entre les mictions

3. Heure 24 (précisement)

: terminer la récolte en procédant à une dernière miction. Important: bien mélanger l'entier de la récolte (dans un même récipient si plusieurs bouteilles) juste avant le prélèvement d'un

échantillon dans le tube.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine

Monovotto houchon izuno –

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si oxalate demandé aussi, le même tube suffit.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

| Préparation | Important! Juste avant de prélever l'échantillon d'urine à envoyer, bien mélanger l'entier de la récolte. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conservation | Si citrate seul conserver l'urine (vol min 2.0 ml) à 4°C. Si + oxalate: conserver l'urine (vol min 4.0 ml) à -20°C. |
| Conditions d'acheminement | Si citrate seul : envoyer l'urine à 4°C. Si + oxalate: envoyer l'urine congelée sur glace carbonique. |
| Acheminement | |
| Conditions d'acheminement | Si + oxalate : envoi immédiat pour acidification au laboratoire. |
| Dépose des prélèvements | Réception des laboratoires |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| | |



| Pneumatique | 439 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Horaire d'ouverture de la réception | Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00 |
| Téléphone | 021 31 44 280 |
| Astreinte | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| Site web | Réception des laboratoires |

Analytique

Prestataire

| Prestataire | Laboratoire de chimie clinique |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | 24/24H |
| Téléphone | 021 31 44 121 |
| Site web | <u>Chimie clinique</u> |

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

