Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00685

V19 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Corps cétoniques (quantitatifs)

Sang



Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Les corps cétoniques comprennent les analyses suivantes: acetoacetate et le beta-hydroxybutyrate (D-3-hydroxybutyrate)	
Renseignement téléphonique	021 31 44 121	
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire	
Fréquence d'exécution	2x/semaine	
Analyse accréditée	OUI	
Spécialité	Chimie clinique	
Synonyme	Acide acétoacétique, acide beta-hydroxybutyrique, acide 3-hydroxybutyrique, acide 3-oxobutyrique, acétoacétate, 3-hydroxybutyrate	
Prescription		
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang	



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux		
Instruction(s) particulière(s)	Le prélèvement doit être fait sur acide perchlorique 0.6 N (PCA). Obtenir le récipient : 021 31 44 280.	
	Suivre scrupuleusement le protocole suivant :	
	Placer le tube de PCA dans la glace pilée au moins 10 min avant le prélèvement.	
	Introduire précisément 1 ml de sang natif dans le tube contenant 1 ml	
	de PCA refroidi.	
	Agiter immédiatement et vigoureusement. Replacer le tube dans la glace.	
Matériel standard		
Quantité	1	
Contonant	Tube PCA	
Contenant	Sur demande au desk du BH18-100 - tél 44 280	
Règle(s) si cumul avec d'autres ana	lyses Si demande de lactate/pyruvate, le même tube suffit.	
Traitement du prélèvement pour re	quérants externes	
Conservation	Conserver le tube "PCA + sang complet" à -20°C.	
Conditions d'acheminement	Envoyer le tube "PCA + sang complet" sur glace carbonique.	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Amener le tube dans la glace le plus rapidement possible par porteur à la réception des laboratoires.	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30	



Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Résultats

Interprétation	Intervalles de référence:
	https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dl/documents/DMLP-LCC-Val-
	Ref-LactatePyruvate-bHydroxybutyrate-Acetoacetate.pdf

Méthode analytique

Principe de la méthode	• LC-MS/MS
------------------------	------------

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 54

