



Catalogue des analyses - Laboratoire

Cortisol

Sang


Informations générales

Examen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ajout d'analyse | possible si sérothèque existante |
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 121 |
| Horaire de réalisation | 24h/24 |
| Analyse accréditée | OUI |
| Synonyme | Cortisol, hydrocortisone, |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang |
| Epreuve dynamiques | Epreuves dynamiques: Consulter les protocoles de prélèvement dépendant des tests. Des renseignements succincts figurent au verso du bon de demande |

Pré analytique

Matériel standard

| | |
|---|--|
| Quantité | 1 |
| Contenant | Tube 4.9 ml sérum sans gel  Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990 |
| Règle(s) si cumul avec d'autres analyses | Jusqu'à 3 analyses sur sérum le même tube suffit |

Matériel pédiatrique

| | |
|------------------|------------------------|
| Quantité | 2 |
| Contenant | Microtube 0.3 ml sérum |



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

| | |
|---|--|
| Règle(s) si cumul avec d'autres analyses | Augmenter le nombre de microtubes |
| Traitement du prélèvement pour requérants externes | |
| Préparation | Centrifuger et décanter le sérum. Volume idéal (y compris sérothèque): 1 ml vol min pour l'analyse seule: 0.2 ml |
| Conservation | Conserver le sérum à 4°C |
| Conditions d'acheminement | Envoyer le sérum à T° ambiante |
| Acheminement | |
| Dépose des prélèvements | Réception des laboratoires |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture de la réception | 24h/24 |
| Téléphone | 021 31 44 280 |
| Site web | <u>Réception des laboratoires 24/24.</u> |

Analytique

Prestataire

| | |
|---|-----------------------------------|
| Prestataire | Laboratoire de chimie clinique |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | 24/24H |
| Téléphone | 021 31 44 121 |
| Site web | Chimie clinique |

Méthode analytique

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Analyseur | cobas e 801 / Roche Diagnostics |
|------------------|---------------------------------|

Post analytique

Conservation après examens

| | |
|-------------------------|--------|
| Aliquote congelé | 3 mois |
|-------------------------|--------|

Tarif

| | |
|--------------------|------|
| Tarif (CHF) | 17.4 |
|--------------------|------|