



Catalogue des analyses - Laboratoire

Cortisol

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Synonyme Cortisol, hydrocortisone,

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
999069
Lien
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Epreuve dynamiques Epreuves dynamiques:
Consulter les protocoles de prélèvement dépendant des tests.
Des renseignements succincts figurent au verso du bon de demande

Pré analytique

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Jusqu'à 3 analyses sur sérum le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 2

Contenant Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 999002

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter le sérum. Volume idéal (y compris sérothèque):
1 ml
vol min pour l'analyse seule: 0.2 ml

Conservation Conserver le sérum à 4°C

Conditions d'acheminement Envoyer le sérum à T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Analyseur	cobas e 801 / Roche Diagnostics
------------------	---------------------------------

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	3 mois
Tarif	
Tarif (CHF)	17.4