Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00686

V18 - 22/10/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Cortisol

Sang



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation

Analyse accréditée

Synonyme Cortisol, hydrocortisone,

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069 **Lien**

<u>010 - Chimie clinique - Sang</u>

Epreuve dynamiques

Epreuves dynamiques:

Consulter les protocoles de prélèvement dépendant des tests.

Des renseignements succincts figurent au verso du bon de demande

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Microtube 0.3 ml sérum





Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le sérum. Volume idéal (y compri 1 ml vol min pour l'analyse seule: 0.2 ml	is sérothèque):
Conservation	Conserver le sérum à 4°C	
Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum à T° ambiante	
Acheminement		
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24	



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Analyseur cobas e 801 / Roche Diagnostics

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF)

