Catalogue des analyses - Laboratoire

## **Cortisol**

Salive

### Informations générales

Exa	m	ρ	n
CAU		•	

Préparation du patient	1 heure après arrêt aliments et boissons et brossage de dents
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Cortisol salivaire
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061232 Lien

### Pré analytique

**Prélèvement** 

Instruction(s) particulière(s)

Salivation libre directement dans le récipient, pendant 15 minutes maximum. Pas de crachat. Collecter au moins 3 ml.

012 - Chimie clinique - Matériel spécial

**Matériel standard** 

Quantité

**Contenant** Récipient stérile, PS, fond plat





Bouchon gris vissant N° commande : 908016

#### Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Nuit et we

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	Réfrigéré
Conditions d'acheminement	Si possible au frais.
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24.



## **Analytique**

### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

# Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 54

