



Catalogue des analyses - Laboratoire

Cortisol libre

Urine




Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Chimie clinique
Synonyme	Hydrocortisone, cortisol urine 24h
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien 011 - Chimie clinique - Urine

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"> Urine de 24h
Instruction(s) particulière(s)	<p>Récolte des urines de 24h: Ne pas acidifier. Bien mélanger. Conserver au frigo entre les mictions. Si spot urinaire : prélever si possible la deuxième miction du matin (première miction = urine de la nuit)</p>
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	<p>Tube 8.5 ml pour urine</p>  <p>Monovette bouchon jaune – N° commande : 949151</p>
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Conditions d'acheminement	A envoyer congelé
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• LC-MS/MS
-------------------------------	------------------------------------------------------------

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	54
--------------------	----