



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Cortisol libre

Urine



## Informations générales

### Examen

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Chimie clinique

#### Synonyme

Hydrocortisone, cortisol urine 24h

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande


061220

##### Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Urine de 24h</li> </ul>
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	<p>Récolte des urines de 24h: Ne pas acidifier. Bien mélanger. Conserver au frigo entre les mictions. Si spot urinaire : prélever si possible la deuxième miction du matin (première miction = urine de la nuit)</p>
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	<p>Tube 8.5 ml pour urine</p>  <p>Monovette bouchon jaune – N° commande : 949151</p>
<b>Traitement du prélèvement pour requérants externes</b>	
<b>Conditions d'acheminement</b>	A envoyer congelé
<b>Acheminement</b>	
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Chimie clinique</a></u>

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- LC-MS/MS

## Post analytique

### Tarif

<b>Tarif (CHF)</b>	54
--------------------	----