

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# C-peptide

Sang

## Informations générales

### Examen

<b>Indication diagnostique</b>	<b>Attention! Si demande concomitante avec l'insuline, ce sont les conditions préanalytiques de l'insuline qui prévalent !</b>
<b>Préparation du patient</b>	A jeun pour taux basal
<b>Ajout d'analyse</b>	possible si sérothèque existante
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Fréquence d'exécution</b>	2x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chimie clinique</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	peptide-C
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999069 <b>Lien</b> <a href="#">010 - Chimie clinique - Sang</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT – N° commande : 998991

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit


## Matériel pédiatrique

**Quantité**

1

**Contenant**

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium

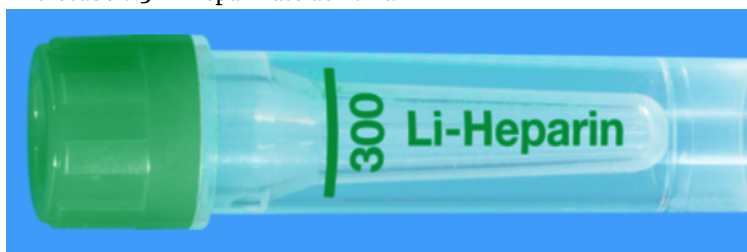

Microvette ISO bouchon VERT – N° commande : 999003

**Volume minimum**

1 microtube bien rempli  
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** Augmenter le nombre de microtubes

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation**

Centrifuger et décanter le plasma :  
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml  
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

**Conservation**

Conserver à 4 °C; si > 24 h, congeler à -20°C

**Conditions d'acheminement**

A 4°C si l'acheminement se fait dans les 24 h, sinon à -20°C

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

**Téléphone** 021 31 44 280

**Site web** [Réception des laboratoires 24/24](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

**Délai de rendu** 2-3 jours

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • ECLIA

**Analyseur** cobas e 411 / Roche Diagnostics

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 3 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 33.3