

Catalogue des analyses - Laboratoire

C-peptide

Sang

Informations générales

Examen

Indication diagnostique

Attention! Si demande concomitante avec l'insuline, ce sont les conditions préanalytiques de l'insuline qui prévalent !

Préparation du patient

A jeun pour taux basal

Ajout d'analyse

possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence d'exécution

2x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

peptide-C

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande
061219

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml héparinate de lithium

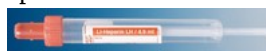

Monovette bouchon orange - N° commande : 510208

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette bouchon orange - N° commande : 511158

Volume minimum

1 microtube bien rempli
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le plasma :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

Conservation

Conserver à 4 °C; si > 24 h, congeler à -20°C

Conditions d'acheminement

A 4°C si l'acheminement se fait dans les 24 h, sinon à -20°C

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	2-3 jours
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">ECLIA

Analyseur	cobas e 411 / Roche Diagnostics
------------------	---------------------------------

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	3 mois
Tarif	
Tarif (CHF)	33.3