Catalogue des analyses - Laboratoire

# **C-peptide**

Sang

## Informations générales

Exa	m	ρ	n
CAU		•	

Indication diagnostique	Attention! Si demande concomitante avec l'insuline, ce sont les conditions préanalytiques de l'insuline qui prévalent!
Préparation du patient	A jeun pour taux basal
Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	peptide-C
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang

## Pré analytique

**Prélèvement** 


• Sang veineux

Matériel standard

**Quantité** 

**Contenant** Tube 4.9 ml héparinate de lithium



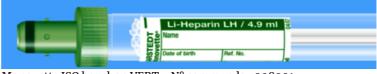

Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

#### Matériel pédiatrique

	1
Ouantité	-
Oualitie	

Contenant	Microtube 0.3 ml héparinate de lithium		
	ရွိ Li-Heparin		

Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum	1 microtube bien rempli
volume minimum	(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le plasma : - volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml - volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml
Conservation	Conserver à 4 °C; si > 24 h, congeler à -20°C
Conditions d'acheminement	A 4°C si l'acheminement se fait dans les 24 h, sinon à -20°C
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439



Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Horaire d'ouverture de la réception	2411/24

**Téléphone** 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24

### **Analytique**

**Prestataire** 

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

Site web Chimie clinique

Résultats

**Délai de rendu** 2-3 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode • ECLIA

Analyseur cobas e 411 / Roche Diagnostics

### Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF)

