



Catalogue des analyses - Laboratoire

Créatine / guanidinoacétate

Urine

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Erreurs innées du métabolisme – Déficiences en créatine
Ajout d'analyse	Créatinine-Urine
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	2x/mois
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Chimie clinique
Synonyme	Créatine, GAA, guanidinoacetic acid.
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien <u>011 – Chimie clinique – Urine</u>

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Urine fraîche

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum

0.5 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Volume minimum: 0.5 ml.
Congeler (-80°C)

Conservation

Congeler à -80°C

Conditions d'acheminement

Envoi sur glace sèche ou neige carbonique.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode • LC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 130.5

Condition(s) spéciale(s) La créatinine est automatiquement ajoutée à l'analyse et est facturées en sus.