



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Créatinine

Urine 24h



## Informations générales

### Examen

#### Ajout d'analyse

Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Horaire de réalisation

24h/24

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Chimie clinique

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

061220

Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

#### Renseignements à fournir

Volume et durée de la récolte.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Urine de 24h

#### Instruction(s) particulière(s)

Mélanger à chaque miction, mettre au frigo entre les mictions bocal gradué 2l (pour diurèse/récolte d'urine).

#### Matériel standard

##### Quantité

1

##### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

#### Matériel pédiatrique

##### Quantité

1

##### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

#### Volume minimum

2 ml

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

#### Téléphone

021 31 44 280

#### Site web

Réception des laboratoires 24/24.

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Chimie clinique</a></u>
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jaffé</li></ul>
<b>Analyseur</b>	cobas 8000, Roche Diagnostics

## Post analytique

### Tarif

<b>Tarif (CHF)</b>	2.3
--------------------	-----