Catalogue des analyses - Laboratoire

Cuivre

Sang



Information(s) importante(s)

Attention

Analyse réservée aux requérants internes

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Analyse sous-traitée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	Cuprémie, Cu
Prescription	

Formulaire de demande Numéro de commande

999069 **Lien**

<u>010 - Chimie clinique - Sang</u>



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Sélénium et zinc: le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 3

Contenant Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Matériel néonatologie

Quantité 3

Contenant Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter sérum (min 0.4 ml)



Conservation	Sérum à 4°C
Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum à T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Site web Méthode analytique	Chimie clinique



Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00700

V17 - 17/06/2025

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 39.6

