

Catalogue des analyses - Laboratoire

Dépistage prénatal des trisomies 21 et 18 - 2ème trimestre

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Le calcul des risques de **trisomie 21** et de **trisomie 18** au 2ème trimestre de la grossesse est effectué à l'aide du logiciel Fast Screen qui nécessite:

1. la détermination des taux sériques d'AFP et de β hCG libre
2. l'âge gestationnel basé sur la date des dernières règles ou sur les mesures échographiques (en cas de FIV, sur la date de fécondation)
3. les données démographiques et cliniques de la patiente (âge, origine ethnique, poids, diabète, antécédent de T21 ou de T18, tabagisme, FIV, gémellarité et chorionicité)

Ce dépistage peut être réalisé entre les semaines de grossesse **14 0/7 à 19 6/7**.

Renseignement téléphonique

079 55 69 048

Fréquence et/ou horaire d'exécution

2 à 3 fois par semaine

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

Test du 2ème trimestre

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[Bon T2](#)

Lien

[Bon T2](#)

Autre formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Renseignements à fournir

Utiliser le formulaire spécifique "**2ème trimestre de la grossesse : détermination des risques de trisomies 21 et 18**" et compléter toutes les rubriques.

Pour les requérants internes : associer en plus un bon de demande "N° 10 - Chimie clinique - Sang" et cocher la case "2ème trimestre : T21 et T18" sous "Dépistage prénatal" (ancienne version de bon: case "2ème trimestre: T21 et NFTN")

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

 Si l'acheminement de sang natif ne peut se faire **dans les 24 h**, centrifuger et décanter le sérum :

- volume idéal : > 1.5 ml
- volume minimum : 1.0 ml

Conservation

Conserver le sang natif à 4°C si l'acheminement se fait dans les 24 h, sinon décanter et congeler le sérum à -20°C.

Conditions d'acheminement

- sang natif : à 4°C si dans les 24 h
- sérum : si possible à -20°C (sinon à 4°C si acheminement < 4 h)

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

 Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation

A l'aide du logiciel Fast Screen.

Méthode analytique

Analyseur

Kryptor GOLD / ThermoFisher Scientific

Technique

Pour l'AFP et la β hCG libre : technique TRACE

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

1 an

Tarif

Tarif (CHF)

33.2