Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_00706

V15 - 22/10/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Digoxine**

Sang



# Informations générales

Cv	-
cxame	п

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de digoxine (intervalle de référence disponible).
Indication diagnostique	Suivi thérapeutique, réponse insatisfaisante, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse, doute sur la compliance.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence et/ou horaire d'exécution	08h00-16h00, jours ouvrables (si demande en urgence, contacter le laboratoire)
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	Lanoxin
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999070 Lien 013 - Chimie clinique - Médicaments
Renseignements à fournir	Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques.
Pré analytique	
Prélèvement	
Nature	Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	<ul> <li>Délai d'équilibration : 5-7 jours à posologie constante</li> <li>Délai de prélèvement : juste avant la dose suivante (min. 8 h postdose)</li> </ul>
Matériel standard	
Quantité	1





Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande: 999008

#### Matériel pédiatrique

1 Quantité

Microtube 0.3 ml sérum **Contenant** 



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

1 microtube bien rempli **Volume minimum** 

(requérants externes: 2 microtubes bien remplis)

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Centrifuger et décanter le sérum : **Préparation** - volume idéal : 500  $\mu$ l

– volume minimum : 200  $\mu l$ 

à 4°C **Conservation** 

à 4°C **Conditions d'acheminement** 

**Acheminement** 

Réception des laboratoires Dépose des prélèvements

BH18-100 Site

Bugnon 46 **Adresse** 1011 Lausanne

439 **Pneumatique** 

24h/24 Horaire d'ouverture de la réception

021 31 44 280 Téléphone



# **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

#### Résultats

Interprétation	Durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 <b>42 500</b> ),
Interprétation	sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique <b>en cas</b>
	d'urgence.

#### Méthode analytique

Principe de la méthode	• KIWIS
Analyseur	Integra 400 Plus / Roche Diagnostics

## Post analytique

#### Tarif

Tarif (CHF)	9.9
raili (Cili )	

### **Prestation Tarmed** Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min

