

Catalogue des analyses - Laboratoire

Electrophorèse des protéines

Sang

Informations générales

Examen

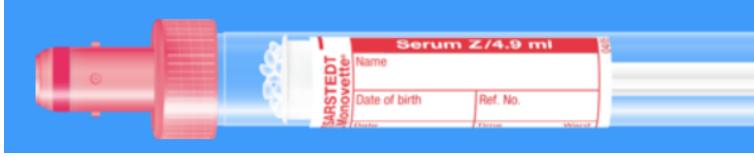
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1 à pls x/semaine
Analyse accréditée	OUI

Prescription

Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang
-----------------------	--

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel  Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger durant 5 min à température ambiante à 3600G.
Décanter le sérum, volume min : 0.4 ml

Conservation Conserver le sérum à 4°C.

Conditions d'acheminement Envoi à température ambiante.

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	27.9
--------------------	------